



玉汝成
YUCERA

氧化锆快速烧结炉

YRC-HS007



高效烧结，更快、更稳、更智能

产品参数

型号	YRC-HS007
炉膛尺寸	炉腔安全尺寸:直径 \leq 105mm,高度 $<$ 80mm
外形尺寸	420mm*568mm*816mm
净重	73kg
电源	220V \pm 10%, 50/60Hz, 13.6A
额定功率	3KW
烧结数量	单层: \leq 30个单位 双层: \leq 60个单位
曲线条数	200条曲线:预设10条快烧曲线/可自定义189条/1条不可编辑(清洁程序)
温度范围	室温~1650 $^{\circ}$ C
恒温精度	\leq \pm 2 $^{\circ}$ C
热电偶	B型双铂铑
加热元件	4支*1850硅钼棒
温升速率	\leq 200 $^{\circ}$ C/min
炉膛材质	氧化铝纤维
坩埚材质	常规坩埚材质氧化铝陶瓷 快烧坩埚材质氧化铝纤维

深圳玉汝成口腔材料有限公司

Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co.,Ltd.

电话: 400-995-8505

邮箱: info@yucera.com

网站: www.yucera.com

地址: 深圳市坪山区石井街道石井社区竹青路35号




扫码关注公众号

YRC-HS007氧化锆快速烧结炉

YRC-HS007是玉汝成创新智造的一款多功能氧化锆快烧炉，采用高纯度硅钼棒加热元件，实现精准温场控制，烧结效果均匀一致。40min快烧（搭配玉汝成3D极速锆块）+双层坩埚设计，显著提升修复效率与产能，可适配牙科技工所与椅旁临床的多样化场景，实现更快的诊疗节奏、更可控的修复效果、更满意的患者体验。

双层坩埚，每层坩埚放置30颗牙齿，最多可烧结30颗单冠或10个三联桥（具体看义齿大小决定）

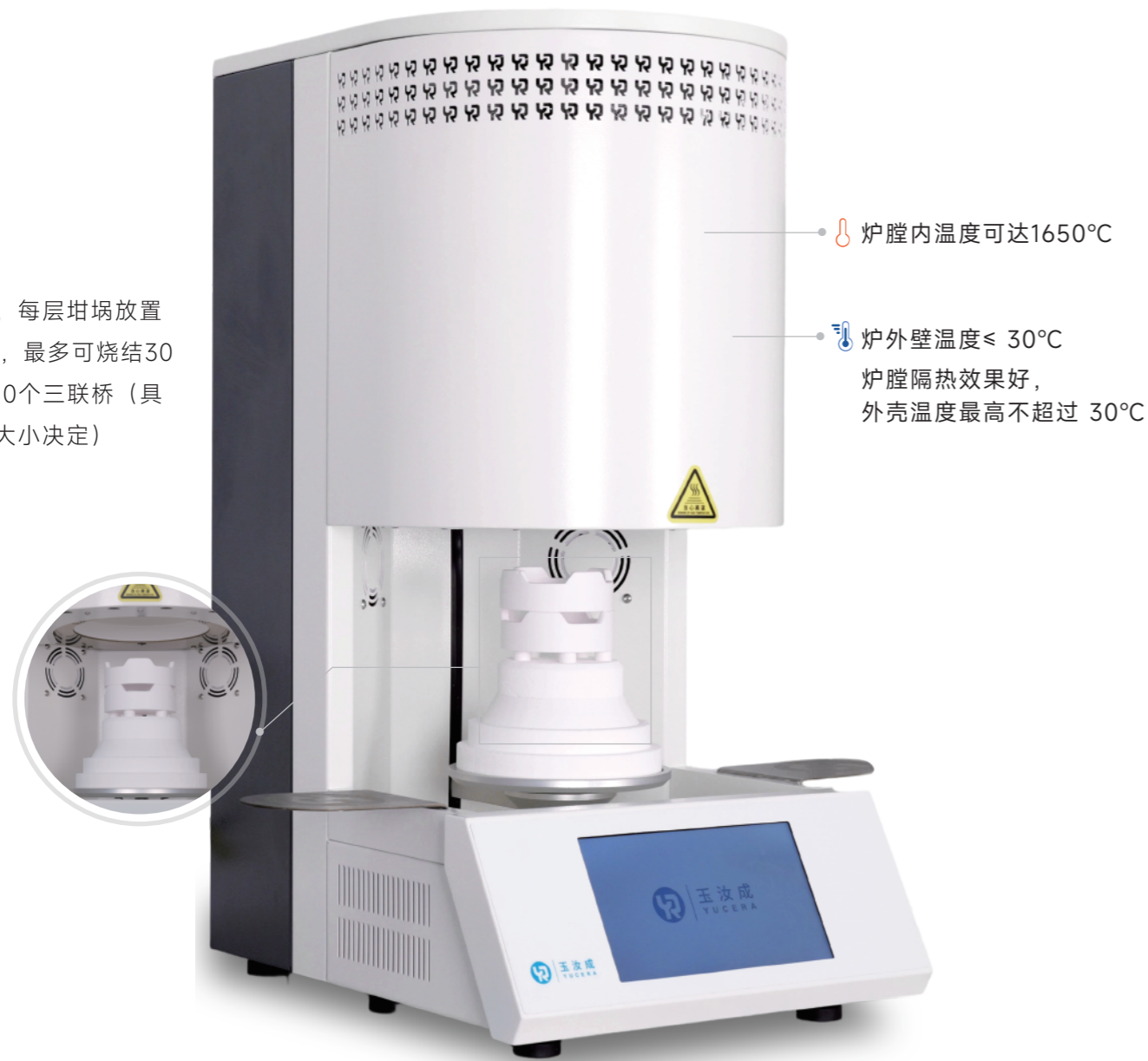

注意：炉外壁温度与室内环境温度相关，室温范围25°C±10，湿度:最大 60% 非冷凝。设备上方需保持1米以上空间通风，左右两侧保持0.5米，后方保持0.2米空间

产品特点

40min快烧，效率领衔

- 升温速率200°C/min，最快40分钟完成烧结
- 双层坩埚设计，最高支持60颗义齿同步烧结
- 搭配玉汝成3D极速锆块，效果更佳

智能温控，精准稳定

- PDI智能温控，烧结色泽均匀
- 氧化铝纤维炉膛，持久保温
- 支持断电续烧，可从任意一段曲线开始工作

安全可靠，持久耐用

- 高纯度硅钼棒加热元件，纯净抗氧化，使用寿命长
- 炉膛隔热优异，外壳温度 ≤30°C，操作更安全
- 实时监测温度、电流、电压，异常自动报警

操作省心，轻松上手

- 10英寸触摸屏，操作更轻松
- 支持189条自定义曲线，10条预设程序，一键启动烧结
- 预烘干功能，提升整体流程效率

升温速率

使用快速烧结合时

温度°C	1~1000°C	1000~1200°C	1200~1400°C	1400~1550°C	1550~1650°C
升温速率°C/min	10~200°C/min	10~100°C/min	10~70°C/min	10~50°C/min	10~30°C/min

使用常规烧结合时

温度°C	1~1000°C	1000~1200°C	1200~1400°C	1400~1550°C	1550~1650°C
升温速率°C/min	10~200°C/min	10~60°C/min	10~40°C/min	10~25°C/min	10~15°C/min

产品配件

