



玉汝成
YUCERA

牙科烧结膏

一款不返工的烧结膏

强粘附，无残留，烧结无忧



产品优势

功能性优势

- 强力物理支撑，防塌陷变形
- 耐受1000°C+高温，性能稳定
- 优异粘接强度，定位恒定

操作性优势

- 即用型注射器包装，免调配
- 棉状质地，易挤出塑形
- 广泛适配各类修复体与载体

结果导向优势

- 无残留，确保修复体洁净
- 显著降低失败率，减少返工
- 优化材料工时，降低成本

使用方法

玻璃陶瓷材料使用方法


在使用前请将待粘接的修复体清洗干净，确保表面无水分及污染物。



打开烧结膏针管密封盖，轻推针管活塞柄。



将黄豆大小的膏体挤于修复体底部，将支撑钉插入冠内并固定。

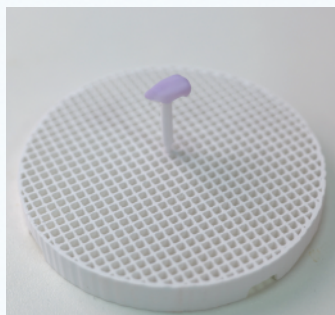

然后放置在结晶盘或烧结板上。



烧结完成后取出来清理干净。

氧化锆陶瓷材料外染后使用方法

在使用前请将待粘接的修复体清洗干净，确保表面无水分及污染物。




打开烧结膏针管密封盖，轻推针管活塞柄。



将烧结膏均匀涂抹在已固定于烧结盘的支撑柱上。



将外染后的修复体轻轻放置在支撑钉上固定。

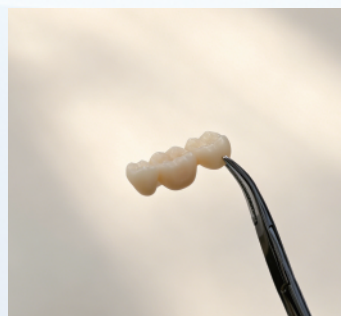

烧结完成后取出来清理干净。